

Исх.№ 09-26 от 24.03.2026

## **О компьютерном томографе.**

Уважаемая Анжела Константиновна,

Компания «SPECTRIX SA» (Швейцарская Конфедерация), являющаяся официальным дилером компании Canon Medical Systems Corporation (Япония) в Беларуси, настоящим выражает своё почтение и сообщает, что является организацией, поставляющей компьютерный томограф для УЗ «6-я городская клиническая больница» в строящийся корпус, 2-я очередь.

Для подготовки технических условий на размещение компьютерного томографа, в адрес Иностранного унитарного предприятия по оказанию услуг «Техмедсервис Спектрикс», официального авторизованного сервисного центра компании Canon Medical Systems Corporation в Республике Беларусь, были переданы планы помещений, предоставляемых под монтаж оборудования (1.058 – процедурная, 1.059 – техническая, 1.060 – пультовая). Рассмотрев предлагаемые помещения, было сделано заключение о невозможности размещения комплектных блоков источника бесперебойного питания (ИБП) в пом. 1.059 (недостаточная площадь). Необходимо предоставить помещение достаточной площади для размещения блоков ИБП в соответствии с прилагаемыми требованиями. Также рекомендуется размещение комплектного системного трансформатора и блока реконструкции томографа в смежном помещении (максимальная длина кабельных трасс между блоками томографа 23 м, см. Приложение).

В связи с вышеизложенным прошу предоставить следующую информацию, необходимую для подготовки ТУ под монтаж КТ:

1. этажность здания, этаж размещения оборудования и планы смежных этажей;
2. план этажа, на котором будет проводиться монтаж.
3. обмерочный план кабинетов с указанием:
  - фактических размеров периметра и высоты,
  - размеров проемов (дверных, оконных),

- выступающих конструкций и привязок к ним (потолочных ригелей, колонн, коробов, радиаторов, подоконников, умывальников, вент. шахт и пр.).
  - фактической высоты кабинетов (при наличии ригелей, балок и т.д. указать отдельно от уровня чистого пола до ригеля, балки);
  - вентиляционных шахт, коммуникаций водоснабжения и канализации, места размещения умывальников и пр.
4. на плане указать стационарное оборудование, неподлежащее демонтажу или перемещению, вентиляционные шахты, места магистральной прокладки водоснабжения и канализации, места размещения умывальников и пр;
5. если кабинет реконструируемый указать:
- наличие смотрового окна (привязка и размеры),
  - наличие рубильника/места подключения комплектного щита,
  - наличие существующих кабельных каналов (сечение и привязки);

Информацию можно направить любым удобным способом:

- на электронный адрес [aphotin@spectrix-service.biz](mailto:aphotin@spectrix-service.biz), почтой в адрес организации или курьером.

Контакт для связи +375 44 599-90-31, Алексей Фотин,  
начальник сервисной службы «Техмедсервис Спектрикс».

Приложение:

1. Бланк для заполнения исходных данных для проектирования, на 3 (трёх) листах в 1 (одном) экземпляре;
2. требования на размещение ИБП, на 2 (двух) листах в 1 (одном) экземпляре;
3. Информация о блоках КТ, на 2 (двух) листах в 1 (одном) экземпляре.

Директор АО «SPECTRIX SA»  
(Швейцарская Конфедерация)  
Тристан Занон

